


Prega News[®]

RAPID PREGNANCY DETECTION KIT


99% ACCURATE RESULT*




Mankind

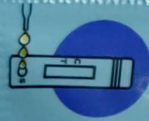


RESULT • परिणाम

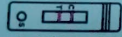


• Two Pink Lines at C&T - **POSITIVE**
• दो गुलाबी रेखाएँ ही और टी पर - **सकारात्मक**

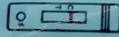

• One Pink Line at T - **NEGATIVE**
• एक गुलाबी रेखा टी पर - **सकारात्मक**

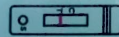

• One Pink Line at T - **INVALID**
• एक गुलाबी रेखा टी पर - **अवैध**

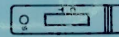

• No Pink Line - **INVALID**
• कोई गुलाबी रेखा नहीं - **अवैध**

PROCEDURE

- 1 Open the pack just before use
- 2 Add 3 drops of urine in the sample slot provided on the device
- 3 Read the result within 5 minutes
- 4 Discard the device after use
- 5 Do not add urine in the window marked as "C&T"

प्रयोगविधि

- 1 पैक को इस्तेमाल करने से ठीक पहले ही खोलें
- 2 मूत्र की तीन बूँदें ड्रिपवाइस पर दिए गए सैंपल स्लॉट पर डालें
- 3 सिर्फ 5 मिनट के अन्दर ही परिणाम को देखें
- 4 उपयोग के बाद ड्रिपवाइस को फेंक दें
- 5 "सी और टी" वाले हिस्से पर मूत्र न डालें

NET QUANTITY

- Each kit contains:
- 1 U Test Device (card)
 - 1 टेस्ट ड्रिपवाइस (कार्ड)
 - 1 U Disposable Dropper
 - 1 डिस्पोजेबल ड्रॉपर
 - Silica gel as desiccant
 - सिलिका जेल नमी सोखने के लिए
- Keep out of reach of children.

STORAGE • रखरखाव


- Storage temperature 2° to 30° C
- 2° से 30° C के तापमान पर रखें

- Flexibility to do the test anytime of the day
- दिन में कभी भी गर्भावस्था परीक्षण के लिए उपयुक्त



Marketed by: MANKIND PHARMA LTD,
208, Okhla Industrial Estate-3, New Delhi-110 020
Contact/Helpdes: Customer Care Cell: Toll Free No.: 18001034400
E-mail: helpdes@preganews.com, Website: www.preganews.com
© - Registered Trade Mark
Manufactured in India by:
Mediforce Healthcare Pvt. Ltd., Unit-II
Plot No. 46, Industrial Area, Gurgaon, Tehsil Panetta Sahib,
District Gurgaon-173025, Haryana Pradesh

Mfg. Lic. No.: MFG/VD/2021/000098
Batch No.:
Mfg. Date:
Exp. Date:
M.R.P. ₹:
(inclusive of all Taxes)

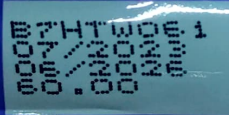

प्रेगा न्यूज़® Prega News


One-step urine hCG pregnancy test Scan the QR code for how to use

Agglutinating sera reagent for detection of hCG
For In Vitro Diagnostic Use
For single use only
Not for internal or medicinal use

*Clinically Tested
*As per IQVIA June '22
MKA0TLMHTSP629005



CE 2265

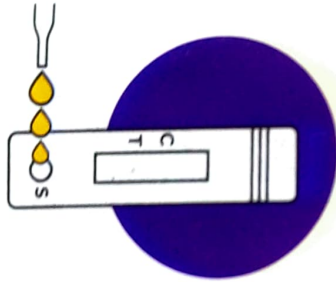

PROCEDURE

- 1 Open the pack just before use
- 2 Add 3 drops of urine in the sample slot provided on the device
- 3 Read the result within 5 minutes
- 4 Discard the device after use
- 5 Do not add urine in the window marked as "C&T"


प्रयोगविधि

- 1 पैक को इस्तेमाल करने से ठीक पहले ही खोलें
- 2 मूत्र की तीन बूंदें डिवाइस पर दिए गए सैपल स्लॉट पर डालें
- 3 सिर्फ 5 मिनट के अन्दर ही परिणाम को देखें
- 4 उपयोग के बाद डिवाइस को फेंक दें
- 5 "सी और टी" वाले हिस्से पर मूत्र ना डालें


STORAGE • रखरखाव

- Storage temperature 2° to 30° C
- 2° से 30° C के तापमान पर रखें


RESULT • परिणाम

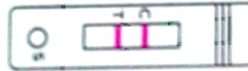


- Two Pink Lines at (C&T) - **POSITIVE**
- दो गुलाबी रेखाएँ (सी और टी पर) - सकारात्मक

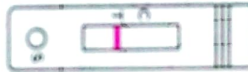

- One Pink Line at T - **INVALID**
- एक गुलाबी रेखा टी पर - अवैध

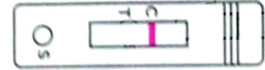

- One Pink Line at C - **NEGATIVE**
- एक गुलाबी रेखा सी पर - नकारात्मक

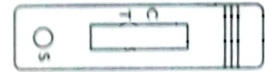

- No Pink Line - **INVALID**
- कोई गुलाबी रेखा नहीं - अवैध

- Flexibility to do the test anytime of the day
- दिन में कभी भी गर्भावस्था परीक्षण के लिए उपयुक्त

Keep out of reach of children.

NET QUANTITY

60 U Prega News Test Kits